

# VASCA PER IDROTERAPIA

Modello VT16



Dispositivo medico attivo ad uso temporaneo progettato per eseguire bagni con acque termali in forma non potenzialmente pericolosa, destinato ad essere utilizzato in centri benessere e stazioni termali. **VT16** è un dispositivo elettromedicale per trattamenti di:

- **Bagno semplice**
- **Bagno gorgogliato**
- **Bagno gorgogliato con aggiunta di ozono**
- **Idromassaggio con aggiunta di ozono**
- **Cromoterapia**

**Hidrea**  
TECNOLOGIA DEL BENESSERE  
[www.hidrea.it](http://www.hidrea.it)

 **CICO**  
soluzioni tecnologiche avanzate

La vasca viene installata permanentemente o contro parete (vasca destra o sinistra) o a centro stanza in locali specificatamente adibiti e gestita da una scheda elettronica. L'interfaccia con l'utente è costituita da un pannello operatore a bordo vasca, semplice e intuitivo, costituito da 6 tasti e 1 display.

Le dimensioni della vasca assemblata sono di 1815 x 865 x 680 mm e il contenuto di acqua pari a 270 litri (senza utente). Il corpo della vasca è realizzato in ABS+PMMA con rinforzo in fibra di vetro, tutta la componentistica è studiata per resistere alle acque termali.

Sulla scocca sono fissate le bocchette di erogazione aria/acqua per eseguire i vari trattamenti. La conformazione della vasca è fatta in modo da essere il più possibile ergonomica e sicura per il paziente; presenta un alloggiamento poggiatesta, una barra poggipiedi, due maniglioni laterali per aiutare il paziente a sedersi ed alzarsi. Può essere richiesta la fornitura di un gradino. Il corpo interno della vasca è pensato per trattare diverse zone del corpo: aree dorsali e cervicali; area cosce; area polpacci; area ginocchia e cosce; area pianta piede. La posizione del bacino è ad un livello più basso rispetto alle gambe per rendere più efficace l'ossigenazione.

In fase di configurazione, è possibile scegliere la durata dei trattamenti tra le seguenti: 10-15-20-25 minuti.

### **Impianto di riempimento e svuotamento**

Il sistema di carico e di scarico può essere manuale, automatico o combinato. In caso di funzionamento automatico, la vasca è dotata di elettrovalvole azionate dai tasti del pannello operatore. In caso di carico manuale, ci saranno dei rubinetti esterni alla vasca e predisposti dal cliente per il collegamento; in caso di scarico manuale verrà posizionata una manopola a bordo vasca. Sistema di troppo pieno di sicurezza, sensore di livello e di temperatura acqua in vasca.



## **TRATTAMENTI ESEGUIBILI**

### **Bagno Semplice**

Il bagno semplice è uno tra i sistemi di impiego dell'acqua termale più diffuso. Gli effetti benefici del bagno termale sono molteplici, dovuti al calore, alla pressione dell'acqua su tutte le parti del corpo immerso, l'umidificazione ed il lavaggio. È una terapia in cui il paziente si immerge in vasca, in genere ad una temperatura dell'acqua compresa tra i 36 e i 38°C; la durata del bagno è di circa 15 minuti. Dalla tipologia di acqua termale utilizzata e dalla sua composizione chimica dipendono gli effetti terapeutici del bagno.

### **Bagno Gorgogliato**

Il trattamento consiste in getti di aria semplice all'interno della vasca riempita con acqua termale attraverso 24 ugelli posti sul fondo della vasca. La caratteristica principale è la dolcezza di erogazione ed il piacevole massaggio prodotto a contatto con il corpo. L'aria compressa può essere fornita o da attuatori interni alla vasca (Blower o Turbina) oppure da impianto centralizzato.

### **Idromassaggio**

Il trattamento sfrutta i benefici dell'idroterapia e quelli del massaggio/massoterapia. È regolato da un'elettropompa interna alla vasca e dalle tubazioni in PVC collegate alle 8 bocchette di erogazione, al cui interno avviene la miscelazione di aria e acqua, che origina il getto massaggiante. Le bocchette di erogazione sono orientabili per consentire di direzionare l'azione massaggiante e la pressione del getto è regolabile attraverso quattro regolatori aria, posti a bordo vasca. Con l'idromassaggio è possibile applicare il kit di disinfezione automatica.



## OPTIONAL APPLICABILI

### Gradino personalizzato

per ambienti medicali e centri benessere, antiscivolo e dotato di protezione del perimetro esterno.

### Kit disinfezione automatica

Gruppo di sanificazione e pulizia tramite disinfettante, completo di comando per la gestione. Elettrovalvola di iniezione di disinfettante in vasca più serbatoio per contenimento prodotto.

### Ozonoterapia

Il bagno gorgogliato e l'idromassaggio possono essere addizionati con ozono, il quale viene generato da un apposito dispositivo e immesso in vasca, per effetto Venturi, dagli stessi ugelli del bagno gorgogliato e/o bocchette dell'idromassaggio. Il massaggio sulla pelle è legato alla produzione delle bollicine d'aria ozonizzata e continuamente rinnovata.

### Cromoterapia

All'interno della vasca sono presenti 2 spot RGB che possono essere attivati in associazione ad ognuno dei trattamenti sopra descritti. Attraverso l'apposito tasto, è possibile scegliere tra 8 colori singoli (bianco, rosso, giallo, arancio, verde, azzurro, blu o fucsia) oppure tra 3 cicli colori (ENERGY, RELAX o TONIC).

### Kit doccetta esterna

Doccetta con supporto montato a bordo vasca e rubinetto per l'azionamento.

### Kit miscelatore

In caso di carico manuale a bordo vasca può essere richiesto un miscelatore, che viene azionato dall'operatore per l'ingresso dell'acqua in vasca.

## VARIANTI E ALLESTIMENTI

La vasca per idroterapia può essere fornita con diversi allestimenti, in base alle differenti esigenze della clientela, riassunti nella seguente tabella

	VT16-SGI	VT16-SG	VT16-SI	VT16-SGI/Sm	VT16-SGI/Cm	VT16-SG/Sm	VT16-SG/Cm	VT16-SI/Sm	VT16-SI/Cm
Carico	A	A	A	A	M	A	M	A	M
Scarico	A	A	A	M	A	M	A	M	A
Bagno Gorgogliato	X	X	-	X	X	X	X	-	-
Idromassaggio	X	X	X	X	X	-	-	X	X
Disinfezione	O	-	O	O	O	-	-	O	O
Miscelatore	-	-	-	-	O	-	O	-	O
Bagno Semplice	M								
Ozonoterapia	A								
Cromoterapia	-								
Gradino	X								
Doccetta	O								

### Legenda:

**M** Manuale | **A** Automatico | **O** Opzionale | **-** Non Applicabile | **X** Di Serie



## DATI TECNICI

Alimentazione elettrica:	220-240 Vac – 50/60Hz
Modalità di funzionamento:	continuo
Classe di sicurezza:	I tipo BF
Potenza massima:	1650W
Dimensioni:	1815 x 865 x 680 mm
Grado di protezione:	IP45
Peso della vasca:	80 kg circa (senza utente)
Peso massimo del paziente:	150 kg
Capacità massima:	270 litri (senza utente)
Flusso massimo acqua (idromassaggio):	420 l/min
Flusso massimo aria (bagno gorgogliato) con turbina:	90 m3/h
Flusso massimo aria (bagno gorgogliato) con blower:	regolabile (33-43-55 m3/h)
Flusso massimo ozono:	90 mg/h

