

VASCA TERMAL PER DISABILI

Modello VTH16



Dispositivo medico attivo ad uso temporaneo progettato per eseguire bagni con acque termali in forma non potenzialmente pericolosa, destinato ad essere utilizzato in centri benessere e stazioni termali da parte di soggetti disabili, con difficoltà motoria o anziani.

VTH16 è un dispositivo elettromedicale per trattamenti di:

- Bagno semplice
- Bagno gorgogliato
- Bagno gorgogliato con aggiunta di ozono
- Idromassaggio con aggiunta di ozono
- Cromoterapia

Hidrea
TECNOLOGIA DEL BENESSERE
www.hidrea.it

CICO
soluzioni tecnologiche avanzate

La vasca viene installata permanentemente o contro parete o a centro stanza in locali specificatamente adibiti e gestita da una scheda elettronica. L'interfaccia con l'utente è costituita da un pannello operatore a bordo vasca, semplice e intuitivo, costituito da 6 tasti e 1 display.

Le dimensioni della vasca assemblata sono di 1500 x 714 x 1014 mm e il contenuto di acqua pari a 280 litri (senza utente). Il corpo della vasca è realizzato in vetroresina rivestita da gelcoat ceramico neopentilico, tutta la componentistica è studiata per resistere alle acque termali.

Sulla scocca sono fissate le bocchette di erogazione aria/acqua per eseguire i vari trattamenti. La conformazione della vasca è fatta in modo da essere il più possibile ergonomica e sicura per il paziente; presenta un alloggiamento poggia testa, un maniglione laterale per aiutare il paziente a sedersi ed alzarsi e presenta una porta per l'ingresso e l'uscita del paziente, con un'apertura di circa 160°.

In fase di configurazione, è possibile scegliere la durata dei trattamenti tra le seguenti: 10-15-20-25 minuti.

Impianto di riempimento e svuotamento

Il sistema di carico e di scarico può essere manuale, automatico o combinato. In caso di funzionamento automatico, la vasca è dotata di elettrovalvole azionate dai tasti del pannello operatore. In caso di carico manuale, ci saranno dei rubinetti esterni alla vasca e predisposti dal cliente per il collegamento; in caso di scarico manuale verrà posizionata una manopola a bordo vasca. Sistema di troppo pieno di sicurezza, sensore di livello e di temperatura acqua in vasca.



TRATTAMENTI ESEGUIBILI

Bagno Semplice

Il bagno semplice è uno tra i sistemi di impiego dell'acqua termale più diffuso. Gli effetti benefici del bagno termale sono molteplici, dovuti al calore, alla pressione dell'acqua su tutte le parti del corpo immerso, l'umidificazione ed il lavaggio. È una terapia in cui il paziente si immerge in vasca, in genere ad una temperatura dell'acqua compresa tra i 36 e i 38°C; la durata del bagno è di circa 15 minuti. Dalla tipologia di acqua termale utilizzata e dalla sua composizione chimica dipendono gli effetti terapeutici del bagno.

Bagno Gorgogliato

Il trattamento consiste in getti di aria semplice all'interno della vasca riempita con acqua termale attraverso **20 ugelli** posti sul fondo della vasca. La caratteristica principale è la dolcezza di erogazione ed il piacevole massaggio prodotto a contatto con il corpo. L'aria compressa può essere fornita o da attuatori interni alla vasca (**Blower** o **Turbina**) oppure da **impianto centralizzato**.

Idromassaggio

Il trattamento sfrutta i benefici dell'idroterapia e quelli del massaggio/massoterapia. È regolato da un'elettropompa interna alla vasca e dalle tubazioni in PVC collegate alle **5 bocchette di erogazione**, al cui interno avviene la miscelazione di aria e acqua, che origina il getto massaggiante. Le **bocchette** di erogazione sono **orientabili** per consentire di direzionare l'azione massaggiante e la pressione del getto è regolabile attraverso quattro regolatori aria, posti a bordo vasca. Con l'idromassaggio è possibile applicare il **kit di disinfezione automatica**.



OPTIONAL APPLICABILI

Kit disinfezione automatica

Gruppo di sanificazione e pulizia tramite disinfettante, completo di comando per la gestione. Elettrovalvola di iniezione disinfettante in vasca più serbatoio per contenimento prodotto.

Ozonoterapia

Il bagno gorgogliato e l'idromassaggio possono essere addizionati con ozono, il quale viene generato da un apposito dispositivo e immesso in vasca, per effetto Venturi, dagli stessi ugelli del bagno gorgogliato e/o bocchette dell'idromassaggio. Il massaggio sulla pelle è legato alla produzione delle bollicine d'aria ozonizzata e continuamente rinnovata.

Cromoterapia

All'interno della vasca sono presenti 2 spot RGB che possono essere attivati in associazione ad ognuno dei trattamenti sopra descritti. Attraverso l'apposito tasto, è possibile scegliere tra 8 colori singoli (bianco, rosso, giallo, arancio, verde, azzurro, blu o fucsia) oppure tra 3 cicli colori (ENERGY, RELAX o TONIC).

Kit doccetta esterna

doccetta con supporto montato a bordo vasca e rubinetto per l'azionamento.

Kit miscelatore

in caso di carico manuale a bordo vasca può essere richiesto un miscelatore, che viene azionato dall'operatore per l'ingresso dell'acqua in vasca.



VARIANTI E ALLESTIMENTI

La vasca per idroterapia può essere fornita con diversi allestimenti, in base alle differenti esigenze della clientela, riassunti nella seguente tabella



| | VTH16-SGI | VTH16-SG | VTH16-SI | VTH16-SGI/Sm | VTH16-SGI/Cm | VTH16-SG/Sm | VTH16-SG/Cm | VTH16-SI/Sm | VTH16-SI/Cm |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Carico | A | A | A | A | M | A | M | A | M |
| Scarico | A | A | A | M | A | M | A | M | A |
| Bagno gorgogliato | X | X | - | X | X | X | X | - | - |
| Idromassaggio | X | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Disinfezione | O | - | O | O | O | - | - | O | O |
| Miscelatore | - | - | - | - | O | - | O | - | O |
| Bagno semplice | X | | | | | | | | |
| Ozonoterapia | O | | | | | | | | |
| Cromoterapia | O | | | | | | | | |
| Doccetta | O | | | | | | | | |

Legenda:

- M Manuale
- A Automatico
- O Opzionale
- Non applicabile
- X Di serie


DATI TECNICI

| | |
|--|----------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 220-240 Vac – 50/60Hz |
| Modalità di funzionamento: | continuo |
| Classe di sicurezza: | I tipo BF |
| Potenza massima: | 1650W |
| Dimensioni: | 1500 x 714 x 1014 mm |
| Grado di protezione: | IP45 |
| Peso della vasca: | 85 kg circa (senza utente) |
| Peso massimo del paziente: | 150 kg |
| Capacità massima: | 280 litri (senza utente) |
| Flusso massimo acqua (idromassaggio): | 295 l/min |
| Flusso massimo aria (bagno gorgogliato) con turbina: | 90 m3/h |
| Flusso massimo aria (bagno gorgogliato) con blower: | regolabile (33-43-55 m3/h) |
| Flusso massimo ozono: | 90 mg/h |

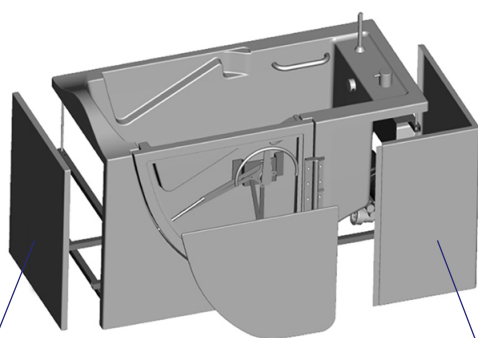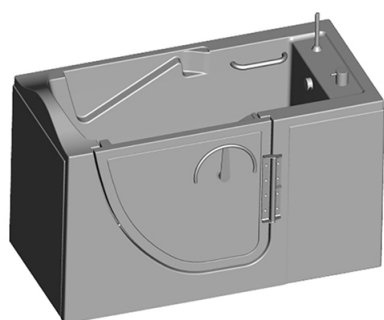

Pannello per ispezione

Pannello a "L" per ispezione

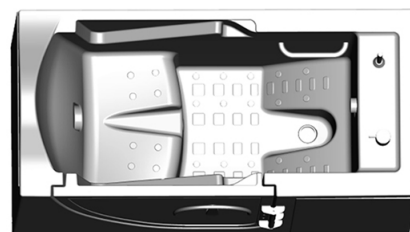

Hidrea
TECNOLOGIA DEL BENESSERE

www.hidrea.it

CICO
soluzioni tecnologiche avanzate